

O PUR®

Uporabnost

Kisik lahko pomaga našemu telesu pri naslednjih težavah

- Utrujenost in izčrpanost
- Razdraženost imunskega sistema
- Težave pri dihanju
- Zmanjšana koncentracija
- Stres in razburjenost
- Glavoboli
- Fizična in psihična izčrpanost
- Ob povečanem ozonu
- Smog in onesnaženje
- Utrujenost

Navodila za uporabo:

- Povežite masko z nastavkom na pretočnem ventilu jeklenke
- Namestite si masko preko nosu in ust
- Privijte pretočni ventil na jeklenko
- Vdihujte globoko skozi nos – izdihujte skozi usta
- Uporaba: odvisno od namena uporabe med 3 in 15 minut

Jeklenka stoji sama, brez pomoči dodatnih pripomočkov

O PUR®

Komplet O-Pur 66 in 110 litrske jeklenke



Komplet vsebuje jeklenko (66 ali 110l), pretočni ventil in obrazno masko. Ventil omogoča neprekinjen pretok kisika med 0 in 4 l/min.

Komplet:	66 litrov	110 litrov
Mere:	18.5 x 7 cm	29.5 x 7 cm
Teža:	0.720 kg	1.080 kg
Pritisk	110 bar	110 bar
Trajanje :		
● 2l/min	33 min	55 min
● 4l/min	16 min	27 min

Kode izdelkov

Komplet	896439	896446
Samo jeklenka	124204	124556

Pakirano v embalaži: 1 jeklenka in 1 maska

O PUR®

Komplet za profesionalno uporabo



Vsebuje:

- 2 x O-Pur 110 litrske jeklenke
- 1 x Regulator pretoka kisika z manometrom in možnostjo nastavitve pretoka od 0 do 15 l/min
- 1 x Torba za prenos jeklenke
- 1 x Obrazna maska
- 1 x Kateter



O PUR®



Regulator pretoka kisika z manometrom in nastavkom za kateter ali obrazno masko. Možnost nastavitve pretoka med 0 in 15 l/min.



Prenosna torba omogoča različne načine možnosti prenosa jeklenke.




Set za kolesarje vsebuje 66 litrsko jeklenko kisika, držalo jeklenke, kateter ter potrebne pripomočke za namestitvev jeklenke na kolo.

O PUR®



O-Pur je na voljo:
v dozi, ki vsebuje:
2L, 3,3L, 5L, 8L in 10 litrov kisika;
v jeklenki, ki vsebuje:
66 ali 110 litrov kisika

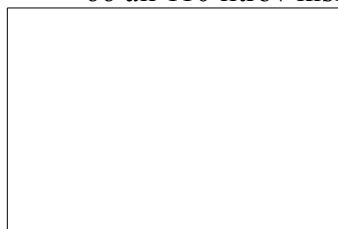

Proizvaja:

NEUPHARM^{SA} NP

Via dei Balconi 4
CH-6917 Barbengo/Lugano

Uvoznik za Slovenijo:

Pulmodata d.o.o.
Balantičeva 11
1234 Mengeš

E-mail: info@pulmodata.si Tel: 01-7239-511

O PUR®

Medicinski kisik v prenosnih jeklenkah



Za premagovanje stresnih in naporih situacij